



TK ラピッド・ワックスカッター 5点セット


上から0° 1° 2° (外側用)

6° 9° (内側用)

販売名 TK ラピッド・ワックスカッター
 販売価格 5本セット 20000円(税別)
 単品販売 各 4200円(税別)



右上3番Iパークラaspのケースで、口腔前庭にアンダーカットがある場合、通常内側(アンダーカット)に内側用TKラピッド・ワックスカッター6°を用いてカットする。この様になると、クラスプアームが頬側に出っ張らず、頬粘膜に接触しづらくなり、違和感が大幅に減少します。

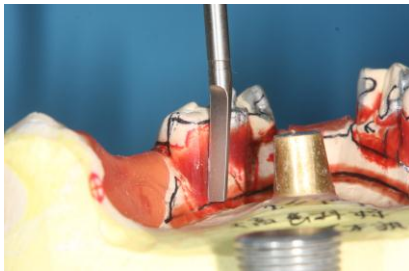

内側用TKラピッド・ワックスカッター9°は下顎リンガルバーに万一アンダーカットが生じる場合に用います。これを用いることで、リンガルバーが舌側に張り出すことを大幅に減少させることができ、違和感を少なくできます。そして本法が臨床的最大の内側角度であります。

下顎左側5番の下方のメジャーコネクター走行部アンダーカットを可及的に少なくする場合は、TKラピッド・ワックスカッター9°を用いてワックスをカットします。この様に内側に9°アンダーカットに入れてもキャストパーシャルは臨床的にスムーズに着脱可能となります。

<p>発売元 日新デンタル株式会社 TEL 03-3833-2941 〒110-0005 東京都台東区上野3-6-6 製造販売業者 有限会社 齋藤デンタル工業 第3種製造販売業許可番号 13B3X00030 東京都葛飾区堀切2-56-8 TEL 03-3691-2219 fax 03-3691-9487 info@saito-dental.co.jp http://www.saito-dental.co.jp</p>	<p>ご用命は</p>
--	-------------